


水洗トイレ用 採便シート

本品は水洗トイレにおいて
便を採取するためのシートです。
使用後はそのまま流せるので簡単で清潔。
使用方法・使用上の注意を
よく読んでご使用ください。

使用方法

① 広げた採便シートを
便がシートの中央にくる
ように敷いてください。

ここから

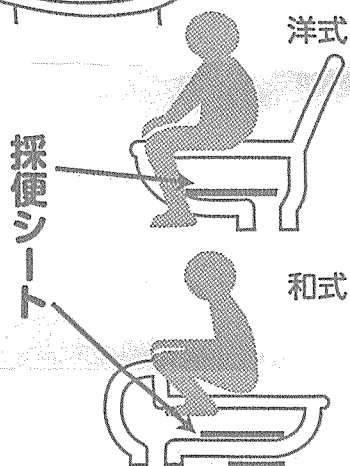

② シートの中央に
排便してください。

※ が目印です。

③ 所定量の便を
採取してください。

ここまで

④ 残った便とシートは
そのままトイレに
流してください。



使用上の注意

排尿後



尿意があれば排尿後に
シートを敷いてください。


止

おしり
洗浄

ビデ

便採取が終わるまで
便座シャワーは
使用しないでください。

少量

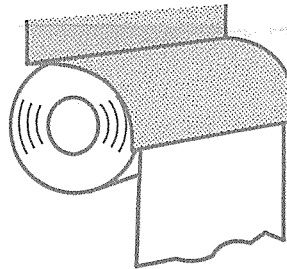

トイレットペーパーの使用は
少量にしてください。
少量でないとトイレが
詰まる恐れがあります。

採取した便検体はすみやかに提出してください。

